

TERMÉKLEÍRÁS

Textil: 50% poliészter, 50% pamut vászon
Szublimációs transzfer papír
Gumizsinór (kalapgumi): fekete, 2mm (
Műanyag zsinór szorító
Pamut cérna: fekete/fehér 3m
Nyomás: Szublimáció

JELLEMZŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Egészségügyi termék, öltözköztetési segítő. A gumi segítségével a fülre akasztva az arcunkon takarja az orr és száj teljes területét.

TARTÓSSÁG

A maszk viselése egészségügyi szempontból maximum 2 óra folyamatos viselése ajánlott. Ha nedves lesz bármilyen okból (izzadás, köhögés...stb.) cserélje le.
Mosógépben mosható (40°C)
Nem ajánlott vegyileg tisztítani és fehéríteni
Szárítógépben alacsony hőfokon szárítható
Alacsony hőfokon vasalható
A maszk élettartama folyamatos használat mellett fél- egy év.

SZABÁS:

A textil sikeres mintázása után fel kell szabni a minta szélén.
A belső alapanyagot (pamutvásznat) egy adott sablon alapján körbe kell rajzolni, majd a vonalak mentén kiszabni. A gumizsinórt 1 db maszk előállításához 2 db 20 cm-es darab és 2 db műanyag zsinór szorító szükséges

VARRÁS:

Varrásöltés: közepes méret

A belsőnek szabott textil bevágásait összevarrni, majd ugyan így a külső műszálas textilt is. Ezután a mintás és a belső darabot összeforgatva le kell szegni 7-10mm (talpszélesen). Varrás közben, mielőtt elérné az első sarkat be kell illeszteni a gumizsinórt, amin már rajta van a szorító és a gumi végét a sarokhoz illeszti úgy, hogy az kifelé nézzen, 1 cm lógjon ki és a két réteg között pedig a hosszabbik része van. A szorító gombja a maszk felső része felé kell néznie. A gumizsinórt többször kell levarni, oda-vissza, majd folytatni a varrás, a következő sarok előttig. Itt a gumizsinór másik végét kell levarni többször, oda- vissza, és itt is lógjon ki a gumi 1 cm-t. A varrás végeztével fordítsuk ki a levart darabot és az eldolgazatlan részből vissza kell hajtani 1 cm-t, majd a másik darab, szorítóval ellátott gumizsinór két végét, a nyílás két

szélébe kell illeszteni úgy, hogy a gumizsinór végeiből 1-1 cm legyen csak a nyíláson belül, majd le kell varrni az anyaggal együtt, maximum 0,5 cm-re az anyag szélétől.

